
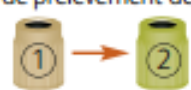


Fiche à remettre au laboratoire avec les échantillons

NOM : .....PRENOM : ..... DATE DE NAISSANCE : .....

**Indication** : Le recueil d'urine sur collecteur stérile est indiqué dans le cas :

- Des **nourrissons** : la miction volontaire, en recueillant les urines dans un flacon à ECBU (flacon bleu), est à privilégier. Mais si cela n'est pas possible le recueil est effectué grâce à une poche stérile en procédant comme indiqué ci-dessous.
- D'une **urétérostomie (sans sonde)** : après nettoyage soigneux de la stomie, mettre en place un collecteur stérile en procédant comme ci-dessous.

Préconisations de recueil		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se laver très soigneusement les mains puis nettoyer soigneusement la zone urogénitale à l'eau et au savon neutre ou à l'aide de la lingette fournie par le laboratoire. Un antiseptique peut être utilisé sur prescription médicale. Bien sécher la peau.</li> <li>• Sortir la poche stérile de son emballage individuel et retirer la protection qui couvre la partie adhésive. Appliquer en massant pour obtenir une bonne adhérence.</li> <li>• Ne pas dépasser 30 minutes de pose du sac collecteur.</li> <li>• Une fois l'urine émise, détacher doucement la poche en tirant un coin.</li> <li>• Puis prélever directement les urines dans le collecteur à l'aide du dispositif fourni par le laboratoire : plonger la canule dans l'urine, sans avoir touché la partie en contact avec l'urine.</li> <li>• Puis enfoncer le tube comme sur le schéma ci-dessous :</li> </ul>		
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Ordre de prélèvement des tubes :</b>   </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Respectez le niveau de remplissage minimum</b>  indiqué par un trait sur l'étiquette du tube kaki. </div> </div>		
Conditions de conservation et d'acheminement au laboratoire		
<b>Transfert du collecteur vers les tubes</b>	<b>Acheminement tubes à température ambiante (15-25°C)</b>	<b>En l'absence de tubes, acheminement du collecteur</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- optimal : moins de <b>15 min</b></li> <li>- acceptable : jusqu'à 2h</li> <li>- refus si au-delà de 2h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tube bouchon <b>vert</b> &lt;24H</li> <li>- Tube bouchon <b>beige</b> &lt;8H</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si conservé à température <b>ambiante</b></li> <li>- acceptable : maxi <b>2h</b> après recueil</li> <li>- refus si au-delà de 2h</li> <li>Si conservé à température <b>réfrigérée (2-8°C)</b></li> <li>- acceptable : maxi <b>12h</b> après recueil</li> <li>- refus si au-delà de 12h</li> </ul>
<div style="float: right; width: 30%;"> <p><b>Identifiez les échantillons</b> avec le nom, prénom et date de naissance</p> <p><b>Merci de renseigner les informations ci-dessous</b></p> <p><b>Date / heure du recueil</b></p> <p>.....</p> <p><b>Température de conservation avant dépose</b></p> <input type="checkbox"/> ambiante  <input type="checkbox"/> réfrigérée <p><b>Antibiotiques en cours :</b></p> <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <p>Si NON date éventuelle de l'arrêt du traitement :</p> <p>.....</p> <p><b>Contexte clinique :</b></p> <input type="checkbox"/> urine souvent  <input type="checkbox"/> fièvre  <input type="checkbox"/> diabète  <input type="checkbox"/> immunodépression  <input type="checkbox"/> préopératoire  <input type="checkbox"/> autre, préciser :  <p>.....</p> <p><b>Renseignements :</b></p> <input type="checkbox"/> intervention sur les voies urinaires dans le trimestre précédent – si oui, préciser :  <p>.....</p> <input type="checkbox"/> hospitalisation dans le trimestre précédent :  <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <p><b>En cas d'urétérostomie :</b></p> <input type="checkbox"/> uretère droit  <input type="checkbox"/> uretère gauche </div>		