

Fiche à remettre au laboratoire avec les échantillons

NOM de Naissance : ..... 1er PRENOM de Naissance : .....  
 NOM utilisé : ..... PRENOM utilisé : .....  
 Lieu de Naissance : ..... Liste des prénoms de Naissance : .....  
 DATE de Naissance : ..... SEXE : .....

### Préconisations de recueil

#### SANG DANS LES SELLES

Fournir au patient le nombre de seringue **Hem Sign 4** et de flacon nécessaire en fonction de la prescription.

#### Recommandations générales :

- **Respecter les 3 jours consécutifs si recherche multiple.**
- Utiliser de préférence des selles solides. (En cas de selles liquides, conserver le flacon d'origine, conservé à +4°C, et le ramener au laboratoire).
- Eviter les prélèvements dans tous les cas de saignements, en particulier provoqués par la constipation, les hémorroïdes ou l'administration de médicaments par voie rectale.
- Périodes de règles : pas de prélèvement 3 jours avant, pendant et 3 jours après les règles.

Pas de régime alimentaire spécifique (L'ingestion de viande ne fausse pas le test qui est spécifique de l'hémoglobine humaine).

#### Pour effectuer le recueil :

Réaliser le recueil dans le flacon bouchon rouge fournit par le laboratoire.

**ATTENTION** les selles doivent être recueillies exclusivement à l'aide du **batonnet bleu**.

- Dévisser le batonnet bleu, le sortir de la seringue.
- Maintenir vertical ce batonnet bleu et piquer dans les selles à 3 endroits différents **la partie torsadée** du batonnet et **uniquement la partie torsadée (photo ci-dessous)**.

**ATTENTION : NE PAS TROP CHARGER LE BATONNET.**

- Remettre le batonnet dans la seringue et la boucher.



**Identifiez les échantillons** avec le nom, prénom et date de naissance ou étiquettes N° unique

**Merci de renseigner les informations ci-dessous**

Date / heure du recueil  
 .....

Température de conservation avant dépose :

- ambiante  
 réfrigérée

Explorations récentes

type coloscopie ou biopsie transrectale :

- OUI  NON

Si oui Préciser + date :  
 .....

Contexte clinique :

- Fièvre  
 Antécédents chirurgicaux digestifs  
 Pathologies digestives  
 Amaigrissement  
 Sang dans les selles observé  
 Autre contexte (si oui préciser)  
 .....

### Conditions de conservation et d'acheminement au laboratoire

	Température ambiante (20-25°C)	Température réfrigérée (2-8°C)
<b>Seringue Hem Sign 4</b>	Seringue à déposer au laboratoire dans les <b>4 jours</b>	Seringue à déposer au laboratoire dans les <b>7 jours</b>
<b>Flacon</b>	Aucune conservation possible du flacon à température ambiante	Flacon à déposer au laboratoire dans les <b>&lt; 72 h</b>

Ne jamais identifier les seringues avant d'avoir effectué le prélèvement. Identifier les prélèvements et la fiche de suivi médical selon l'instruction [IT-MU0-005 « Identification des patients et des prélèvements »](#).

Regrouper l'ensemble (prélèvements + documents) dans un conditionnement unique par patient.