

NOM de Naissance : 1^{er} PRENOM de Naissance :

NOM utilisé : PRENOM utilisé :

Lieu de Naissance : Liste des prénoms de Naissance :

DATE de Naissance : SEXE :

Mode opératoire	
Choix du matériel 	- Ecouvillon ESwab rose ou orange si lésions suintantes ou suppurées - Boîte de Pétri vide ou flacon stérile - Matériel de prélèvement stérile (pince, coupe-ongle, curette de Brocq, vaccinostyle ...) - Lampe de Wood - Scotch Cristal (transparent, non opaque) pour recherche de <i>Malassezia</i>
Conditions préalables	Le prélèvement doit être réalisé après arrêt du traitement antifongique : - 10 jours en cas de traitement local - 3 mois pour les solutions filmogènes ou le traitement par voie général
Réalisation du prélèvement <i>Port de gants recommandé</i> Aspect de la fluorescence en lampe de Wood (peau et cheveux) : ☐ vert ☐ jaune ☐ rouge ☐ absente ☐ non recherchée	➤ Cheveux, cuir chevelu : -Prélever les squames avec une curette à la jonction bord sain/bord lésé. -Prélever les cheveux cassés à la pince à épiler. En cas de plaques d'alopécie, gratter fortement les squames à la curette pour récupérer les cheveux cassés courts. -Prélever les lésions inflammatoires suppurées à l'aide d'un écouvillon. -Noter l'aspect de la fluorescence en lampe de Wood. ➤ Ongles : -La zone d'intérêt mycologique se situe à la jonction ongle sain/ongle malade. Couper la partie de l'ongle atteint avec un coupe-ongles ou des ciseaux jusqu'à la limite des tissus sains. Eliminer la partie de l'ongle atteint. -Cureter l'ongle à la limite des tissus sains à l'aide de la curette stérile. Il est aussi possible de prélever des poussières d'ongles en raclant la tablette interne de l'ongle ou les îlots blanchâtres à la surface de l'ongle, au vaccinostyle ou à la curette stérile. - En cas de périonyxis, prélever à l'écouvillon avec milieu de transport en pressant la lésion. ➤ Peau, squames, plis : -Prélever en raclant fortement la peau, les squames ou les plis à la périphérie des lésions à l'aide d'une curette de Brocq. -Dans le cas d'un pli suintant, recueillir les sérosités avec un écouvillon. ➤ Pour recherche de <i>Malassezia</i> : Le pityriasis versicolor se présente sous forme de lésions hypo ou hyper pigmentées siégeant le plus souvent sur le haut du dos et/ou du tronc. Le prélèvement se fait par application de scotch transparent sur 3 lésions différentes pour récupérer les squames. Noter l'aspect de la fluorescence en lampe de Wood. Le scotch est ensuite appliqué sur une lame.
Elimination des déchets	Eliminer dans les DASRI le matériel ayant servi à la préparation de la zone explorée (compresses, écouvillon non transmis...)
Identification des prélèvements	Ne jamais identifier les tubes avant d'avoir effectué le prélèvement. Identifier avant de sortir de la salle de prélèvement : les prélèvements, la fiche de suivi médical selon l'instruction IT-MU0-005 « Identification des patients et des prélèvements » . Regrouper l'ensemble (prélèvements + documents) dans un conditionnement unique par patient.
Conditions de conservation et d'acheminement au laboratoire Délai acheminement à température ambiante (15-25°C) : optimal dans les plus brefs délais	
Conditions de conservation avant dépose au laboratoire	
Sur ESwab Température ambiante (15-25°C) < 24 h Au-delà : refus de l'échantillon	Squames, ongles, cheveux en récipient stérile Température ambiante (15-25°C) < = 3 jours Au-delà : refus de l'échantillon

Identifiez les échantillons avec nom + prénom + DDN ou étiquettes à N° unique
Merci de renseigner les informations ci-dessous

Date / heure du recueil :

ID Préleveur :

Site de prélèvement :

Aspect des lésions :

Patient immunodéprimé :
☐ Oui ☐ Non

Antifongiques en cours :

- ☐ Non
- ☐ Filmogel (< 3 mois)
- ☐ Locale (<15j)
- ☐ Général (<15j)

Nature du traitement :

Durée du traitement :

Contexte clinique :

- ☐ voyage en zone tropicale
- ☐ métier :
- ☐ contact avec des animaux
- ☐ fréquentation de collectivités type piscine ou salle de sport
- ☐ autre, préciser :